




CooperVision®
Live Brightly.

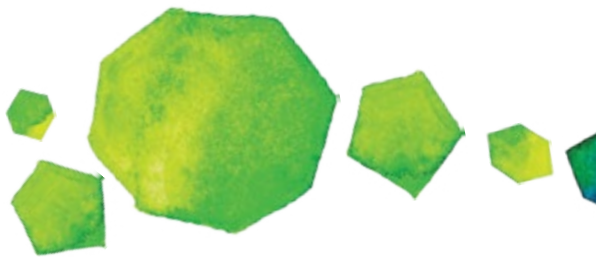

קבלו מאיתנו באהבה: טיפים, המלצות והוראות, לשימוש נכון בעדשות מגע ושמירה על עיניים בריאות!

העיניים הן איבר חשוב ביותר ולכן צריך להקפיד לשמור על בריאותן. התנהלות יומיומית בטוחה ונכונה חיונית לשמירה על הבריאות שלהם. בעלון הזה תוכלו למצוא טיפים ועצות מועילות להרכבה והסרה של עדשות מגע, ומידע שימושי על אופן הטיפול בהן. בהצלחה!



הרכבת העדשות ללא חששות

שלב 1:

לפני שמתחילים,
דבר ראשון רוחצים ומייבשים ידיים!


- לפני כל טיפול בעדשות המגע, יש לשטוף היטב את הידיים בסבון ובמים.
- יש לייבש אותן היטב עם מגבת ללא מוך (סיבים).



שלב 2:

עכשיו מכינים את העדשות לשימוש!


- מוציאים את עדשת המגע מאריזת הבליסטר.
- מניחים את העדשה במרכז כף היד ומקרבים את האצבעות לכיוון המרכז.
- אם היא מונחת על צידה הנכון, העדשה תתקפל כלפי פנים.
- אם היא מונחת על צידה הלא נכון, קצה העדשה ישתטח.

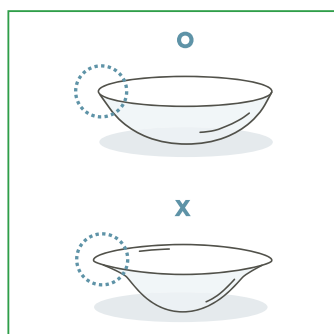

שלב 3:

זה הזמן להכניס את עדשות המגע לעיניים. בהצלחה!


- מרימים את העפעף העליון ומחזיקים אותו קרוב לקו הריסים.
- מושכים כלפי מטה את העפעף התחתון.
- מסתכלים ישר.
- מכניסים את עדשת המגע לעין לאט ובהירות למרכזה – אל החלק הצבעוני של העין.

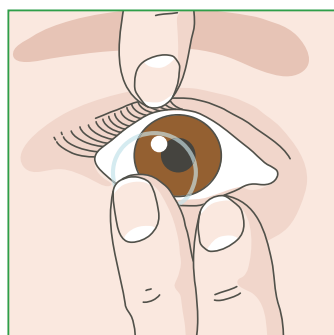

שלב 4:

הצטיינתם במשימה, עכשיו בוזקים שהעדשה במקומה!

- לאחר שעדשת המגע מונחת במקומה בעין, מרחיקים לאט ובהירות מהעין את האצבע המורה.
- מחזיקים את העפעף פתוח, מסתכלים סביב על מנת לשחרר את בועות האוויר, במידה וישנן.
- משחררים לאט ובהירות את העפעפים. ממצמצים בקלות על מנת לאפשר לעדשה להתמקם במקומה.

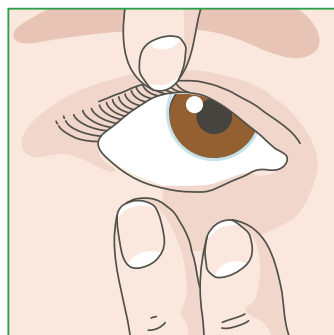


לימים,
שנים ואזורים

An illustration showing a pair of hands being washed under water flowing from a faucet. The hands are positioned with palms facing each other, and the water is depicted as a blue stream. The entire illustration is enclosed within a red rectangular border.

A stylized illustration of a person's face, focusing on the eye and hand. The eye is large, brown, and looking directly forward. Below the eye, two fingers are visible, pointing upwards. The background is a solid light pink color. The entire illustration is enclosed within a thin red rectangular border.

A simple line drawing of a human hand, palm facing up, holding a single white, oval-shaped tablet between the thumb and index finger. The drawing is minimalist, with black outlines and no shading. The entire illustration is enclosed within a red rectangular border.

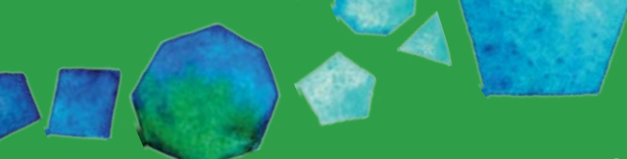

על מה חשוב להקפיד? ממה חייבים להימנע תמיד?

כל מה שרציתם לדעת על עדשות מגע והתביישתם לשאול במדריך שלפניכם!
מתחילים להרכיב עדשות מגע ומתלבטים מה לעשות או לא לעשות כדי לשמור על עיניים בריאות?
ריכזנו עבורכם את כללי הברזל שאתם חייבים לדעת. מוזמנים לשנן וללמוד בעל פה! :

הכי לא!

בשום אופן לא

לאפשר מגע של מים עם עדשות המגע.

מגע עם מים מגדיל את הסיכון לזיהומים משמעותיים בעיניים ויכול אף לגרום לאובדן ראייה. פעולות כמו רחצה עם עדשות, שחייה ופעילויות אחרות המערבות מגע עם מים - אסורות בהחלט!

בשום אופן לא

להרכיב עדשת מגע פגומה.

במידה והבחנתם בכל פגם בעדשת המגע, כמו קרע או חתך, אין להרכיבה, אלא לפתוח אריזה חדשה.

בשום אופן לא

להרכיב עדשות אם העיניים צורבות.

במידה ומרגישים ברע, או שהעיניים אדומות וצורבות, יש להימנע משימוש בעדשות מגע ולהרכיב את משקפי הראיה במקום.

בשום אופן לא

להרכיב עדשות מגע שפג תוקפן.

יש לוודא שקראתם את העלון המצורף לאריזת עדשות המגע, המכיל מידע חשוב כמו תאריך התפוגה ולעולם לא להרכיב אם פג תוקפן.

ברור שכן!

להתחיל

תמיד בעין ימין.

מומלץ תמיד להתחיל מאותה עין בעת הרכבת עדשות המגע. כך הסיכוי להתבלבל ולהחליף בין העדשות קטן!

לוודא

שיש מספיק זמן לביצוע התהליך.

מומלץ לעקוב אחר מדריך זה ביסודיות. יתכן ובתחילת השימוש תהליך הרכבת והסרת העדשות ייקח יותר זמן, אך ככל שצוברים ניסיון התהליך נעשה קל, מהיר ובטוח.

להתמיד

בכל מצב על פגישות המעקב.

ביקורים שגרתיים אצל האופטומטריסט או רופא העיניים חשובים ומאפשרים לבצע הערכה ומעקב אחר התהליך.

לפעול

אך ורק על פי ההמלצות מהאופטומטריסט או מרופא העיניים המטפל.

ישנם סיכונים הנובעים משימוש בעדשות מגע. ניתן להקטין סיכונים אלה למינימום אם פועלים על פי ההנחיות מהאופטומטריסט או מרופא העיניים.